

Ficha técnica

Mascarilla médica/quirúrgica desechable de tres capas con goma TIPO IIR

Descripción:

Mascarilla médica/quirúrgica desechable fabricada con tejido sin tejer de tres capas con goma, TIPO IIR, no estéril

Características:

- Se sujeta con gomas elásticas suaves a las orejas.
- Tres capas
- Ajuste moldeable nasal

Material:

- Capa Externa: fabricada con tejido sin tejer
- Capa Intermedia: papel filtrante
- Capa Interna: fabricada en tejido sin tejer de polipropileno para el mayor confort
- Ajuste nasal metálico
- Elástico industrial recubierto de tela
- No contiene grafeno

Presentación:

Tabla 1 Características de producto

Ref.	Descripción	Tamaño	Color	EAN 13	Contenido
004625	Mascarilla médica/quirúrgica desechable tres capas TIPO IIR	9,5cmx17,5cm	Naranja	8435454004625	50 u/expositor, 40 expositores/Ctn
004632	Mascarilla médica/quirúrgica desechable tres capas TIPO IIR	9,5cmx17,5cm	Lima	8435454004632	50 u/expositor, 40 expositores/Ctn
004649	Mascarilla médica/quirúrgica desechable tres capas TIPO IIR	9,5cmx17,5cm	Amarillo	8435454004649	50 u/expositor, 40 expositores/Ctn
004656	Mascarilla médica/quirúrgica desechable tres capas TIPO IIR	9,5cmx17,5cm	Lila	8435454004656	50 u/expositor, 40 expositores/Ctn
004663	Mascarilla médica/quirúrgica desechable tres capas TIPO IIR	9,5cmx17,5cm	Azul laguna	8435454004663	50 u/expositor, 40 expositores/Ctn
004670	Mascarilla médica/quirúrgica desechable tres capas TIPO IIR	9,5cmx17,5cm	Rosa	8435454004670	50 u/expositor, 40 expositores/Ctn



***Quality Products for a healthy life!**

KL MED SANITECH SOLUTIONS S.L

CIF: B87292751

Av. De las Morcilleras 33

28343 Valdemoro (Madrid) – España

Tel: +34-913 892 300

+34-913 892 301

Ficha técnica

Normativa:

- DIRECTIVA 93/42/CEE, RELATIVA A LOS PRODUCTOS SANITARIOS.
- EN 14683:2019 + AC:2019

Tabla 2 Resultado de ensayos de aceptación para estas mascarillas según criterios

Ensayos	Criterio de aceptación	Resultado
Eficacia de filtración bacteriana (BFE), (%) (la Norma EN 14683)	$\geq 98\%$	Aprobado
Respirabilidad (Presión diferencial) (Pa/cm ²) (la Norma EN 14683)	< 60	Aprobado



***Quality Products for a healthy life!**

KL MED SANITECH SOLUTIONS S.L
CIF: B87292751
Av. De las Morcilleras 33
28343 Valdemoro (Madrid) – España
Tel: +34-913 892 300
+34-913 892 301

Ficha técnica

Mascarilla médica/quirúrgica desechable de tres capas con goma TIPO IIR

Instrucciones de uso:



Colocación de la mascarilla:

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.
2. Identificar la parte superior de la mascarilla.
3. Colocar la mascarilla en la cara y ajustar la pinza nasal a la nariz.
4. Sostener la mascarilla desde el exterior y pasar el arnés de cabeza o anudarlo detrás de la misma, a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos.
5. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla.
6. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla.
7. Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para ajustarla a la nariz.
8. Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario verificar el sellado y la ausencia de las molestias respiratorias.
9. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.

Retirada de la mascarilla

Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:

1. quitarse los guantes de protección;
2. lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica;
3. retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla;
4. colocar la mascarilla que se va a desechar en un recipiente específico
5. lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.

Eliminación de la mascarilla

Para reducir los riesgos del uso de estas mascarillas se debe advertir que una vez usada se debe desechar, porque no es reutilizable.

- Procedimiento para desechar la mascarilla

Las mascarillas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico (preferiblemente con tapa y control no manual, véase la figura 1). Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de desgarro de la bolsa exterior.



Figura 1 – Ejemplo de un contenedor con tapa y control no manual

Las mascarillas utilizadas también se pueden desechar en los contenedores para desechos biológicos.

Duración de uso máximo recomendado:

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 h. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra nueva.



***Quality Products for a healthy life!**

KL MED SANITECH SOLUTIONS S.L

CIF: B87292751

Av. De las Morcilleras 33

28343 Valdemoro (Madrid) – España

Tel: +34-913 892 300

+34-913 892 301

Ficha técnica

Mascarilla médica/quirúrgica desechable de tres capas con goma TIPO IIR

Precauciones de uso:

- Para un solo uso
- No utilizar después de la fecha de caducidad
- Mantener fuera del alcance de los niños

Conservación: Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz directa del sol o de otras fuentes de calor. Conservar en el embalaje original.

Bibliografía: Especificación UNE 0064-1



***Quality Products for a healthy life!**

KL MED SANITECH SOLUTIONS S.L
CIF: B87292751
Av. De las Morcilleras 33
28343 Valdemoro (Madrid) – España
Tel: +34-913 892 300
+34-913 892 301

Mascarilla médica/quirúrgica desechable de tres capas con goma TIPO IIR




Expositor:

Presentación: 50 unidades/expositor

Tamaño de expositor:

18cm(L)x10cm(W)x8,5cm(H)

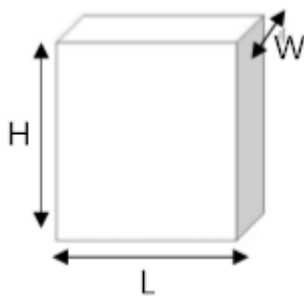

Cartón:

Presentación: 40 expositores/ctn

Tamaño de cartón:

52(L)x38(W)x30cm (H)



***Quality Products for a healthy life!**

KL MED SANITECH SOLUTIONS S.L

CIF: B87292751

Av. De las Morcilleras 33

28343 Valdemoro (Madrid) – España

Tel: +34-913 892 300

+34-913 892 301